

すべてが、ハイグレード。



# MeGUARD PRO

HIGH QUALITY FACE GUARD FOR PROFESSIONALS

進化する医療の現場に、特別なミーガードを。

医療現場のハードな環境において、プロに認められてきた高品質フェースガード【MeGUARD】。その【MeGUARD】に、質感・デザイン・快適性・耐久性をさらに磨き上げた“最上位モデル”が登場。一歩先を行くクオリティで、より質の高い医療をサポートいたします。

進化する医療の現場に、特別なミーガードを。

# MeGUARD PRO

## HIGH QUALITY FACE GUARD FOR PROFESSIONALS

### フィルム交換式

使い捨てタイプだから、いつも清潔・快適な使い心地をお約束します。

### はね上げ可能

フィルムが邪魔なとき、上にはねあげることができます。


### 眼鏡との併用可能

カチューシャ式なので眼鏡をかけた状態でも可能で鼻への負担がありません。


### かんたん交換

フィルムの着脱はとても簡単で、調節もラクに行えます。


MeGUARD PRO 本体に専用フィルムを装着して、ご利用ください。

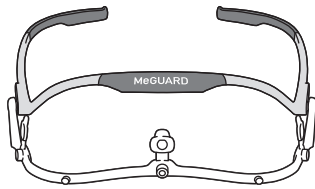

ミーガードプロ 本体

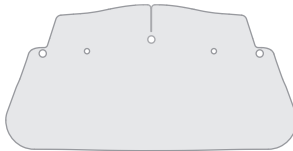


ミーガード専用フィルム(別売)

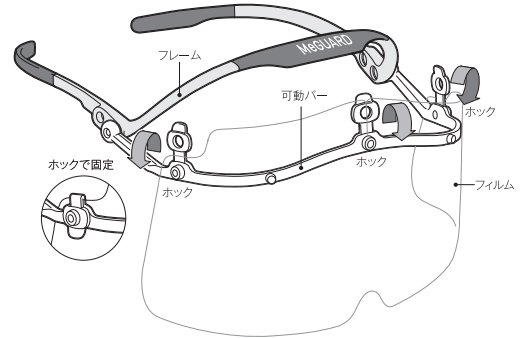

### 可動バーの位置を調整できます。

- ◎MeGUARD PRO完成品はフレーム側の穴と、可動バー側のピン、ネジによって連結されています。
- ◎取り外しは、ネジをドライバーではずした上で、双方の連結部の元を持ってゆっくり引き離してください。
- ◎取り付けは、フレームの左右にある穴から使いやすい位置を選び、可動バーのピンをフレームの穴にまっすぐに押し込んで、ドライバーでネジを締めてください。
- ◎注意：取り付けは、必ず左右の穴の位置を合わせてください。

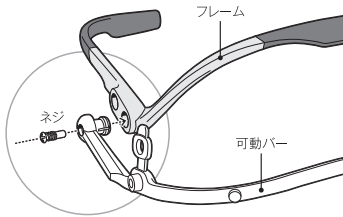

### 正しく装着してご利用ください。

- ◎フレームの前部分を、額の上部を抑えるようにして、装着してください。
- ◎フィルムが不必要なときは、上にはねあげることができます。



### ⚠ 使用上の注意

- ①本製品(フレーム及びフィルム)は滅菌されておりません。有機溶剤など、不適当な薬品を使用した滅菌、清掃は製品の劣化、破損の原因となりますので行わないで下さい。
- ②防曇フィルム(MEG-1F)には片面に保護シートが貼られています。フレームに取り付ける際には保護シートが貼られた状態のまま装着して下さい。また、必ず保護シートを取り外してご使用下さい。保護シートが貼られた状態で使用すると視野が曇り危険です。
- ③フィルムの厚さは約0.1~0.2mmと薄く、また透明度が高いため、目がフィルムを認識し損なうことがあります。眼・手・顔などに怪我をしないよう、注意してご使用下さい。
- ④フィルムに付着した汚れは視界を低下させ安全の妨げになります。汚れたフィルムや複数回の使用は危険です。毎回新しいものにお取り替え下さい。  
※フィルムは単回使用の使い捨てです。
- ⑤ご使用前には必ずフレームとフィルムの取り付け状態、可動フレームとカチューシャフレームの結合状態、フィルムのキズ、汚れなどを点検し、異常が無い事を確かめてから、上下を間違わないように正しく装着して下さい。
- ⑥ご使用者による改造、修理は事故の原因となり、危険ですので行わないで下さい。

### フレームの仕様

- MeGUARDの材質(ネジ、装飾、樹脂部を除く)：チタン
- 装飾部の材質：合金・樹脂【樹脂部の耐熱温度：約70℃】
- 可動バーの材質：ポリプロピレン【可動フレームの耐熱温度：約120℃】
- 重量：約33.0g(Mフィルム付)・約36.5g(Lフィルム付)

### フィルムの仕様

- MEG-1F(M)：Mサイズ【ハーフフェイス】顔の上半分を保護  
size:w247mm×h123mm×t0.13mm
  - MEG-1F(L)：Lサイズ【フルフェイス】顔全体を保護  
size:w248mm×h209mm×t0.13mm
- 製品の素材：トリアセチルセルロース (triacetyl cellulose)

### ⚠ 取扱上の注意

- ①フレームクリーニングは、ぬるま湯に薄めた中性洗剤で手洗いし、水洗いの後に柔らかい布、あるいは柔らかい紙でふき取して下さい。
- ②フレームの消毒、滅菌には、無水エタノール、又は、次亜塩素酸ナトリウムを6%程度に薄めた溶液をご使用下さい。ガス、熱(煮沸)、及び有機溶剤等、不適当な薬品の使用は、製品の劣化、破損の原因となりますので使用しないで下さい。

### ⚠ 本製品は滅菌されていません。

#### フレームの製品環境安全情報

- 【有害性情報】本製品は通常の取り扱い方法(本来の使用状態)に於いて、健康に害を及ぼすことはありません。
- 【燃焼時に発生するガス】一酸化炭素、二酸化炭素、炭化水素、アルデヒド煙、ニトリル化合物などが発生します。
- 【消火方法】水、炭酸ガス、泡消火剤、粉末消火剤などにより、一般の火災と同じ消化方法が有効です。
- 【廃棄上の注意】廃掃法及び地方自治体の条例に従い廃棄して下さい。焼却処分する場合は、廃掃法、大気汚染防止法、水質汚染防止法に従って処理して下さい。
- 【保管上の注意】直射日光を避け、推奨(気温15℃~20℃、湿度45%~55%)の場所に保管し、製品、包装に水、溶剤、ガスなどをかけないで下さい。

商品名	品番	販売単位	定価(税別)	JANコード
MeGUARD PRO (Midnight)	MEGP-MB	1本	32,000円	4580358030509
MeGUARD PRO (Cardinal Red)	MEGP-CR	1本	32,000円	4580358030516
MeGUARD PRO (Titanium Gray)	MEGP-TG	1本	32,000円	4580358030523
MeGUARD専用 交換両面防曇フィルム Mサイズ	MEG-1F(M)	1パック10枚入	2,000円	4580358030059
MeGUARD専用 交換両面防曇フィルム Lサイズ	MEG-1F(L)	1パック10枚入	3,200円	4580358030066

原産国/フレーム本体：日本・フィルム：日本

※製品の仕様は、予告なく変更される場合があります。

【発売元】株式会社ミタス www.mitas-inc.co.jp